

CORINA MEDICAL

ANVÄNDAR MANUAL

M-125

Ägna en stund åt att läsa igenom manualen innan
vågen tas i bruk



Innehållsförteckning

| | |
|--|-------|
| Introduktion | 3 |
| Produkt Specifikation | 3 |
| Säkerhetsföreskrifter | 4 |
| Förklaring av symboler | 5 |
| Strömförsörjning & Lågt batteri | 6 |
| Batteri byte | 6 |
| Montering Pelare | 7 |
| Montering Längdmätare | 8 |
| Drift Grundfunktioner | 9 |
| Drift Avancerade funktioner | 11-13 |
| ROHS Överensstämmelse | 14 |
| Felmeddelande | 15 |
| Manufacturer's Declaration of Conformity | 16 |
| Kontaktuppgifter | 16 |

Tack för köpet av Marsden professional medical scale (Marsden våg för professionellt medicinskt bruk)

Detta är en Klass III väginstrument som erbjuder lång livslängd och många års noggranna mätresultat.

Vågen har en maximal lastkapacitet på 250kg som inte får överskridas.

Produkt Specifikation

| | |
|-----------------------|---|
| Model | Marsden M-125 |
| Accuracy Class | Class III |
| Capacity/Division | 250kg x 100g |
| Weight of Scale | Approximately 8kg |
| Units of Measure | Kg |
| Function Keys | ON/ZERO/OFF, UNIT, SEND, HOLD/BMI, TARE/BSA |
| Stabilisation Time | 1-2 Seconds |
| Operating Temperature | 5 °C to 35 °C |
| Power Supply | 6x 1.5V AA batteries or 12V 1A adaptor (UE24WCP1 – 120100SPA) |
| Indicator Display | 3cm display with 5 active digits |
| Dimensions | Base: 310mm x 310mm x 83mm Indicator: 174mm x 107.6mm x 50mm |
| Warranty | 2 years |

Säkerhetsföreskrifter

Innan du börjar använda vågen, var vänlig och läs noga den informationen som anges i denna manual, som innehåller viktiga instruktioner för korrekt installation, användning och underhåll av vågen.

Marsden / tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår vid underlåtenhet att följa följande instruktioner:

- Vid användning av elektriska komponenter under ökade säkerhetskrav, följ alltid gällande föreskrifter.
- Olämplig installation / användning kommer att göra garantin ogiltlig.
- Se till att spänningen som är märkt på nätaggregatet motsvarar din nätspänning.
- Den här vågen är konstruerad för användning inomhus.
- Obesevera tillåten omgiven temperatur.
- Vågen uppfyller kraven för elektromagnetisk kapacitet. Överstig inte maxvärden som anges i gällande standard.
- Batterier ska hållas borta från små barn. Vid förtäring kontakta genast läkare.

Om problem uppstår kontakta Corina Weighing / Medical.

Rengöring

- Vi rekommenderar att ni använder alkoholbaserade dukar eller liknande vid rengöring av vågen.
- Använd inte frätande vätskor, stora mängder vatten eller högtryckstvättar.
- Koppla alltid ur vågen från elnätet före rengöring.

Underhåll

- Vågen kräver inget rutinunderhåll. Vi rekommenderar dock att ni kontrollerar vågens noggrannhet med jämna mellanrum. Om eventuella felaktigheter uppstår, kontakta Corina Weighing / Medical.

Avfallshantering av vågen

- Vågen ska lämnas in på en Återvinningsstation för elektrisk / elektronisk utrustning.

Förklaring av symboler

SN-21300100



Serienummer som finns angivet på vågen

“Vänligen observer medföljande dokument” eller “Beakta bruksanvisningen”



Identifikation av tillverkare av medicinsk produkt inkl. adress

Charder Electronic Co. Ltd
No.103 Guozhong Rd, Dali Dist,
Taichung City 412, Taiwan (R.O.C)




Type B Applied Part.



Denna produkt ska lämnas in på en återvinningscentral.



Läs noga igenom denna manual före installation och innan vågen tas i bruk.

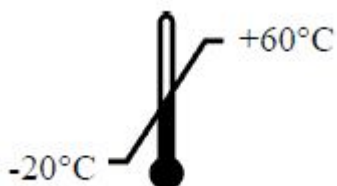


Transport- och lagertemperaturgräns som anger övre och nedre gräns (Transport och förvaringstemperatur på förpackningen)

Strömförsörjning & Lågt batteri


Indikatorn använder ström från 6x AA batterier, eller en nätadapter.

Se till att batterierna är insatta rätt I batterilådan på indikatorn. Alternativt kan nätadaptern anslutas (12V 1A) till indikatorn.


Batteribyta

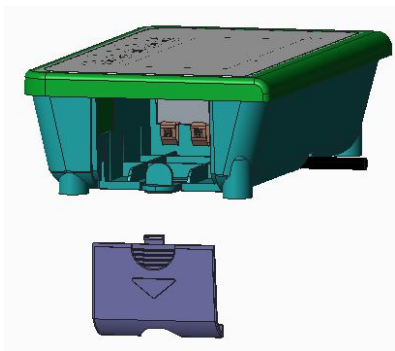


Ta loss batteriluckan.

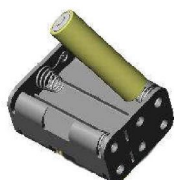

Ta ur batterihållaren och sätt i batterierna, se till att batterierna sitter åt rätt håll.

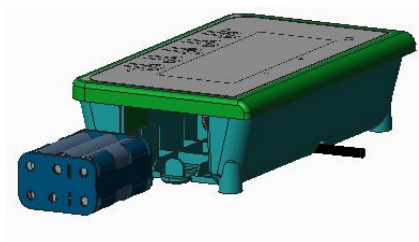


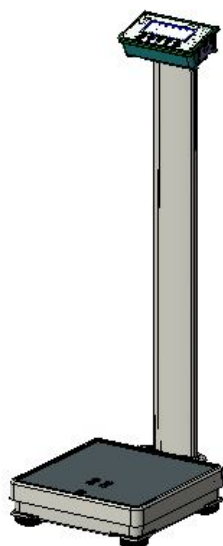
Sätt i batterihållaren .

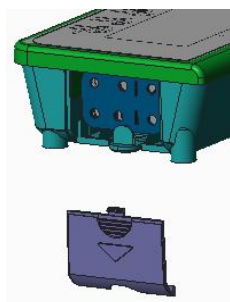


Sätt tillbaka batteriluckan.

Montering av pelare

 Montering av M-125's pelare bör helst utföras av 2 personer.



Placera pelaren i infästningen på vågplattformen. Se till att kablarna hamnar i pelaren.

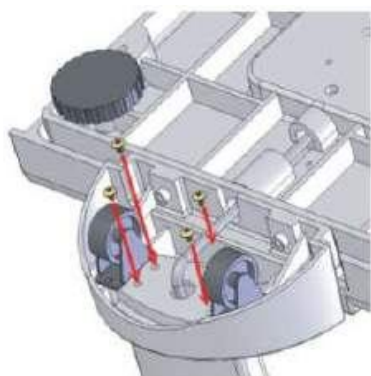


Vänd på vågen.


Skruva i de 4 medföljande skruvarna i hålen.

Montering av längdmätare


M-125 kan kompletteras med en längdmätare (HM-201M)

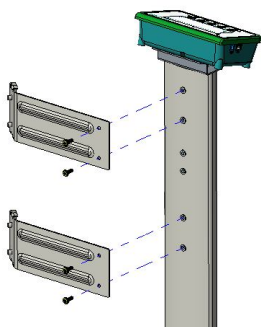

Använd de fyra M5 skruvarna som finns med, montera de två fästerna på pelaren.

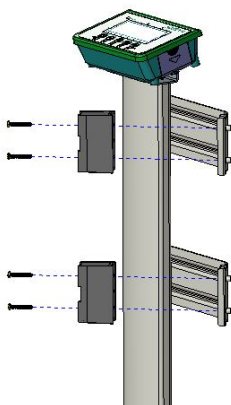


Använd de fyra M5 skruvarna som finns med, skruva fast de svarta blocken på monteringsfästerna.

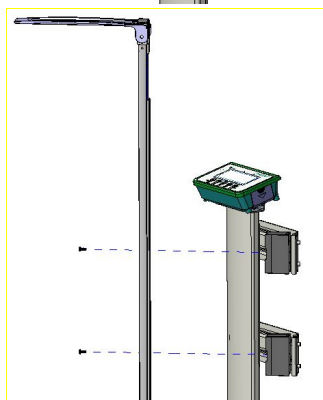


Använd de två M6 skruvarna som finns med, skruva fast längdmätaren på de svarta fästerna.

Drift: Grundfunktioner

Slå på vågen

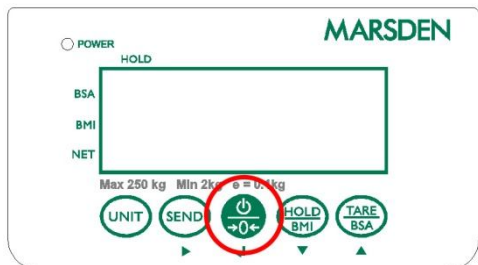


Tryck på ON/ZERO/OFF.

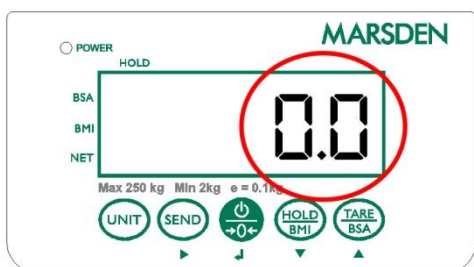


När displayen visar 0.0 kan ni börja väga.

Stäng av vågen

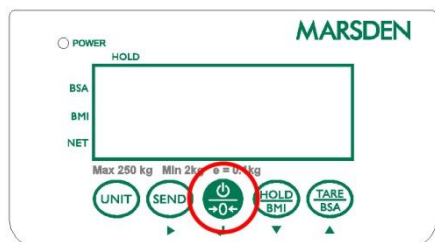


Håll in ON/ZERO/OFF knappen i 3 sekunder. Vågen stängs av.

Använd Zero funktion

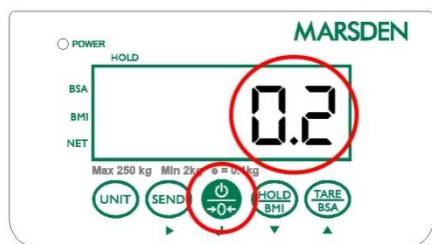


Om displayen inte visar 0.0 när ingen vägning sker, kan den återställas med zero knappen.

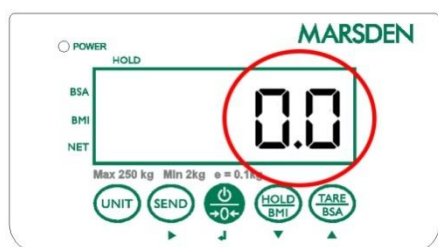


Tryck ner ON/ZERO/OFF en gång.
Displayen visar 0.0.

Drift: Avancerade funktioner


Hold Funktion

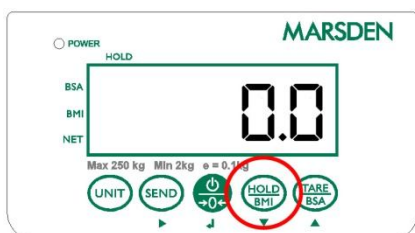

Tryck på HOLD/BMI knappen en gång, antingen medan personen står på vågen eller innan.

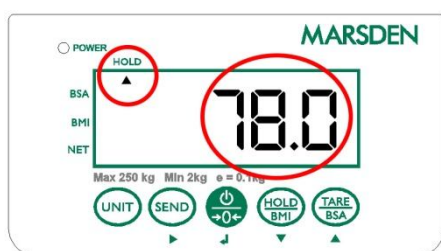

Efter några sekunder låses vågen på personens vikt. När personen går av vågen, fortsätter vikten visas på display.

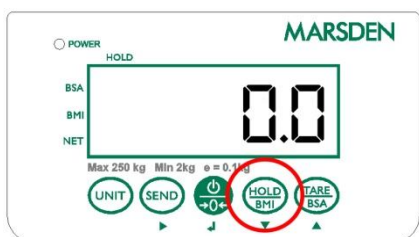


Tryck på HOLD/BMI igen för att inaktivera HOLD-funktionen och vågen visar åter 0,0.

OBS: Om vikten visas på displayen mer än 5 minuter stängs HOLD-funktionen av och vågen återgår till att visa 0,0.


Body Mass Index (BMI) Funktion



Personen ska först stå på vågen.

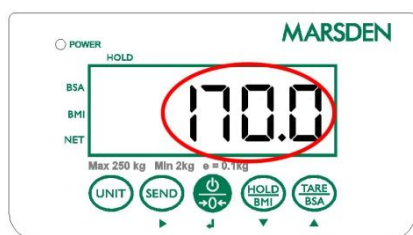


Håll in HOLD/BMI knappen för att visa BMI-läget. Vågen är nu redo för att knappa in längden, den vänstra siffran blinkar.

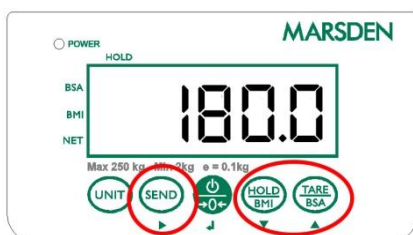

Ange längden genom att använda TARE/BSA-knappen för att minska värdet och HOLD/BMI-knappen för att öka värdet. För att flytta till nästa, tryck på SEND.




För att bekräfta längden tryck på ON/ZERO/OFF knappen, efter några sekunder växlar displayen mellan vikt, längd och BMI.

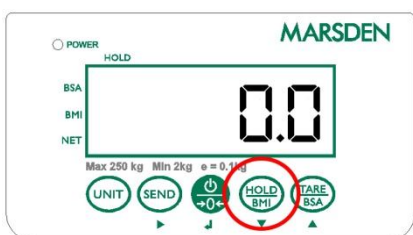


Tryck in BMI för att återgå till normalläge.

Body Surface Area (BSA)

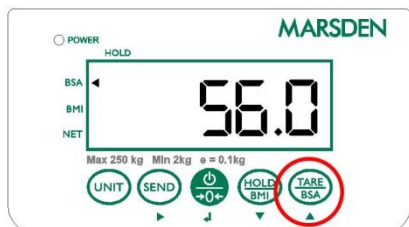


Efter beräkning av BMI, kan ni sedan beräkna BSA. Efter att ha gått igenom de första fyra stegen på BMI-funktionen, tryck på TARE/BSA och Body Surface Area visas.

Tare Funktion

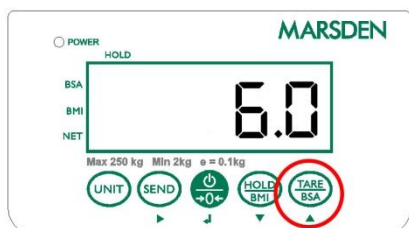

Placera det ni vill ta bort från vikten på vågen (t.ex ett par skor) och tryck på TARE/BSA.

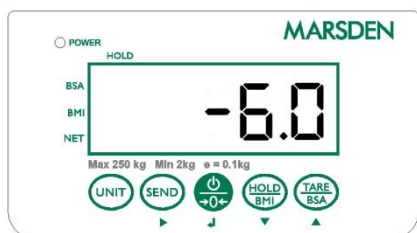

Tag bort t.ex skorna och vågen visar ett minus.



Väg personen som vanligt och den negativa viktavläsningen kommer att dras av från totalvikten.

ROHS Compliance






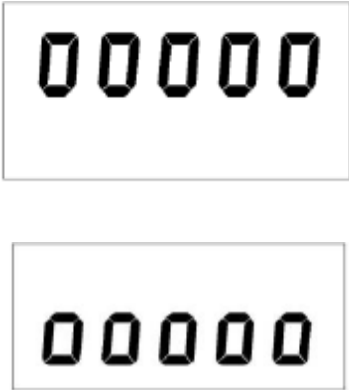

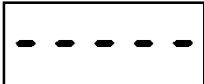
EU Directive 2011/65/EU restrict the use of the 6 substances below in the manufacture of specified types of electrical equipment.

- The product does not contain any of the restricted substances in concentrations and applications banned by the directive;
- and for components, the product is capable of being worked on at higher temperatures required by lead-free soldering.

The restricted substances and maximum allowed concentrations in the homogenous material are, by weight:

| Substance | Concentration |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lead | 0.1% |
| Mercury | 0.1% |
| PBB (Polybrominated Biphenyls) | 0.1% |
| PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers) | 0.1% |
| Hexavalant Chromium | 0.1% |
| Cadmium | 0.01% |

Felmeddelanden

| | |
|---|---|
| <p>Lågt Batteri Byt batterier.</p> |  |
| <p>Överbelastning Totalbelastningen övergår vågens maximal kapacitet.</p> |  |
| <p>Räknefel Signalen från lastcellerna visar för hög eller för låg. Ta bort vikten från vågen, stäng av vågen och starta om den. Om felet fortsätter visas, indikerar det ett fel med elektroniken eller kabelbrott.</p> |  |
| <p>Hög / Låg signal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vågen ligger över sitt nollområde. Ta bort vikten från vågen och starta om. Om vågen fortsätter visa felmeddelande indikerar det ett elektronikfel. 2. Vågen ligger under sitt nollområde. Kontrollera så inget ligger under vågen och starta om. Om vågen fortsätter visa felmeddelande indikerar det ett elektronikfel. |  |
| <p>AD-fel Detta indikerar ett fel på PC-kortet. Kontakta Corina Medical.</p> |  |
| <p>Negativ vägning Viktavläsningen är under -2kg. Tryck på Noll för att återgå till 0,0.</p> |  |

Manufacturer's Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

| | |
|---|---|
|  | 2014/31/EU Non-automatic Weighing Instruments Directive |
|---|---|

Manufactured by:



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 412, Taiwan (R.O.C.)

Corina Medical

Telefon: 0730-57 44 32

Mail: info@corina-medical.se

Webb: www.corina-medical.se